

Certificado de garantía

Garantía por 6(seis) meses.

La garantía no se hará efectiva, en caso de que la Cápsula Corporal hubiera sufrido accidentes, alteraciones, negligencia, maltrato o uso inadecuado, o cualquier daño sufrido por causa de incendios, inundaciones, estragos, caso fortuito o fuerza mayor, reposición o reparación por personal no autorizado.

Usar el equipo solo para los propósitos descriptos en este manual.

Todas las tareas de mantenimiento deben ser ejecutadas por el servicio técnico autorizado.

Siempre desconectar la Cápsula Corporal antes de realizar tareas de limpieza del exterior o interior de la misma.

La garantía no cubre ningún tipo de gasto de traslado del equipo.

VALIDEZ DE LA GARANTÍA 6 MESES



FECHA DE COMPRA



Accesorio Cápsula Corporal



Efectos de la Cápsula Corporal

- Favorece la oxigenación de los tejidos.
- Revitalización celular.
- Mejora de la circulación periférica.
- Lipolítico. Activa metabolismo graso.
- Activa la microcirculación.
- Eliminación de toxinas.
- Mejora la textura y la tonicidad de la piel.
- Hidratación en la piel.
- Efecto antioxidante.
- Efecto inmunomodulador.

Indicaciones de Cápsula Corporal

Patología dérmica:

- Psoriasis.
- Acné.
- Eczemas.

Estética:

- Fotoenvejecimiento.
- Celulitis.
- Adiposidad localizada.

Trastornos en la cicatrización:

- Escaras
- Úlceras
- Queloides

Patología Infecciosa:

- Erisipela
- Piodermia
- Onicomicosis
- Candidiasis
- Forunculosis



Nota: Para realizar tratamientos con la Cápsula Corporal deberá contar con un generador de Ozono que posea Bomba de Vacío



ADELO recomienda siempre utilizar las vías de administración y protocolos que emite esta entidad

Uso de la Cápsula Corporal

El uso de la Cápsula es a través de insuflación.

Para su correcto funcionamiento deberá seguir los siguientes pasos detallados en las instrucciones.

Instrucciones


1. Conectar el cable de alimentación del equipo generador de Ozono de la línea ADELO a la red eléctrica. (220 Vac. - 50 Hz)
2. Conectar la fuente de oxígeno a la entrada de oxígeno del reactor del generador de Ozono
3. Alimentar el equipo generador de Ozono con un caudal constante de un litro por minuto de oxígeno medicinal.
4. Colocar al paciente dentro de la Cápsula Corporal sin ropa y con la piel previamente humedecida.

5. Cerrar la Cápsula


6. Colocar alrededor del cuello, un paño húmedo para evitar la salida de Ozono.

7. Conectar una tubuladura procedente de la Bomba de vacío a la Cápsula.

8. Vaciar la Cápsula.

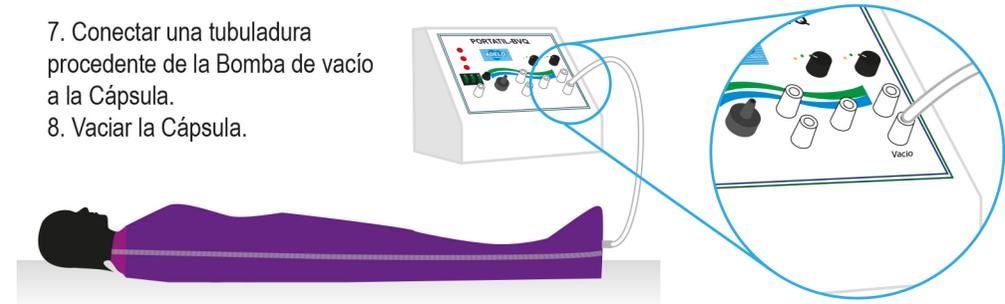


9. Conectar una tubuladura desde la salida de Ozono a la Cápsula e insuflar

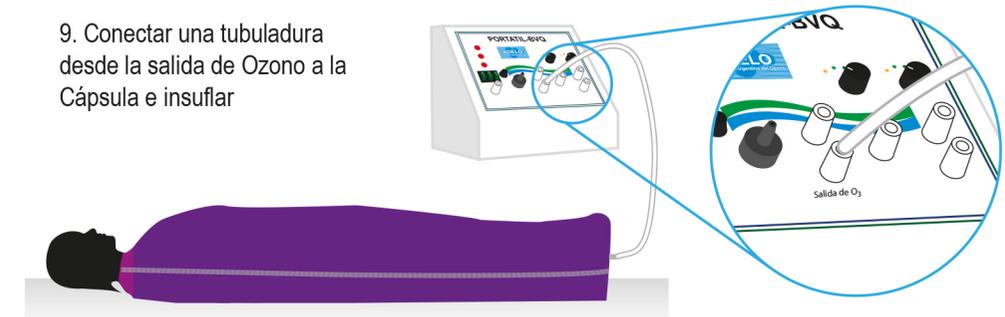

10. Realizar un *Bypass* entre la entrada al Destructor y la salida de aire.

11. Conectar otra tubuladura desde la Bomba de vacío a la Cápsula

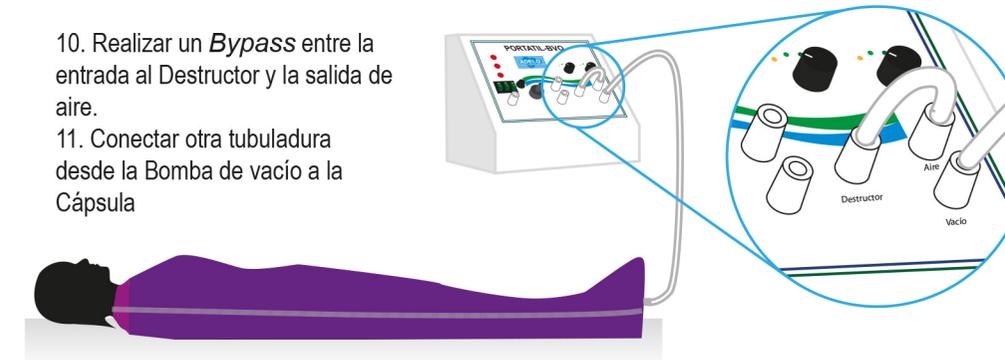

12. Realizar el vacío completo de la Cápsula antes de retirar al paciente